

MAGNOFLEX® - Maxi-Pad

Artikel 7084



Das MAGNOFLEX® - Maxi-Pad als Gesundheits-u. Hygieneprodukt ist anzuwenden bei:

Muskel- und Gelenkbeschwerden, Zerrungen, Prellungen, Verspannungen und Sportverletzungen.

Produktinformation:

2007/47/EG Klasse I UMDNS: **DE/CA22/1150-2** (Bezirksregierung Münster), PZN: **1095221**

Außen-/Innenseite: Außen: Klettvelour mit Schaumstoffkaschierung (66 % PA (Polyamid) 34 % PUR-(Ester Schaum)

Innen: Spezial Mischgewebe mit antimikrobieller Wirkung durch natürliche

Silberionenausrüstung. (98 % PES (Polyester) 2 % PA (Polyamid)

Zwischenlage: Thermowatte 100 % PES (Polyester)

Magnetisierung: Bipolar, 6 Ronden, á 780 Gauss, anisotrop

Magnetmaterial: 90 % Ferritpulver, 10 % PE (Polyethylen), Unterseite unmagnetisiert

Fixierbänder: 2 Klettflauschbänder in verschiedenen Längen

100 % Polyamid, 100 % Polyurethan

Anwendung / Anwendungsdauer / Wirkungsweise*

Das Maxi-Pad kann großflächig, mit den verschiedenen Längen der Klettflauschbänder, an vielen Körperstellen punktgenau angelegt werden.

Das Produktetikett zeigt dabei nach außen.

Bei den meisten Menschen kann eine Linderung der Beschwerden bereits nach 1-2 Tagen eintreten.

Sensibel veranlagte Personen spüren eine Wirkung bereits nach wenigen Stunden.

Bei therapieresistenten Fällen wird eine mittlere Behandlungsdauer empfohlen (ca. 6 Wochen).

Bei chronischen Beschwerden kann die Bandage dauerhaft getragen werden.

Die Magnetfeldanwendung unterstützt den Heilungsprozess ursächlich im Sinne einer Normalisierung der Zellvorgänge. Die Selbstheilungs- und Ordnungskräfte werden aktiviert und gestörte Funktionen im Körper normalisiert.

***Ein Behandlungseffekt kann nur durch direkten Hautkontakt mit Magnoflex erzielt werden.**

Nebenwirkungen / Erstverschlimmerung:

Die Magnetfeldanwendung ist prinzipiell nebenwirkungsfrei. Bei Erstanwendung kann es jedoch anfangs zu einer Schmerzverschlimmerung kommen. Dies zeigt jedoch nur, dass die Magnetfeldanwendung im Körper Reaktionen auslöst, die sich jedoch nach kurzer Zeit normalisieren.

Kontraindikationen

Sind nicht bekannt.

Pflegehinweis: Feinwaschmittel, ausschließlich 30 °C Handwäsche.



MAGNOFLEX® Herstellung und Vertrieb durch:
ORGATERM Produktions- und Warenvertriebs GmbH
Aspastr. 24, 59394 Nordkirchen/Germany
info@orgaterm.de - www.magnoflex.de

Konformitätserklärung:

Die ORGATERM Produktions- und Warenvertriebsgesellschaft mbH erklärt hiermit, dass das Produkt: **MAGNOFLEX®** - Fußgelenkbandage Artikel 7039 (UMDNS: DE/CA22/1150-2, PZN 1095221, Deutsche Patent-Nr. 3733502) aufgrund der Entwicklung und Herstellung sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der Richtlinien 93/42/EEC/EG und 2003/32/EG MPG für Medizinprodukte der Klasse 1 entspricht.

Ausgabestand: 01.06.2016